


Vue physique

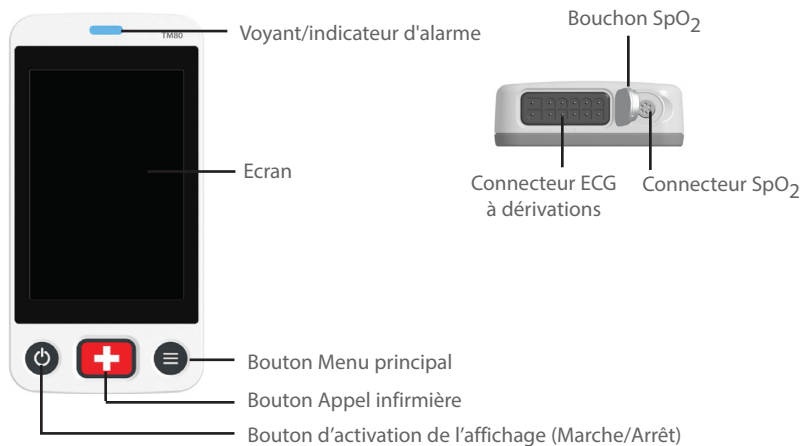

Navigation générale


Commutation de l'orientation

1. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas sur l'écran principal pour afficher les boutons de commutation de l'orientation.
2. Sélectionnez le bouton souhaité.

Balayage pour obtenir des informations supplémentaires



Déploiement des raccourcis

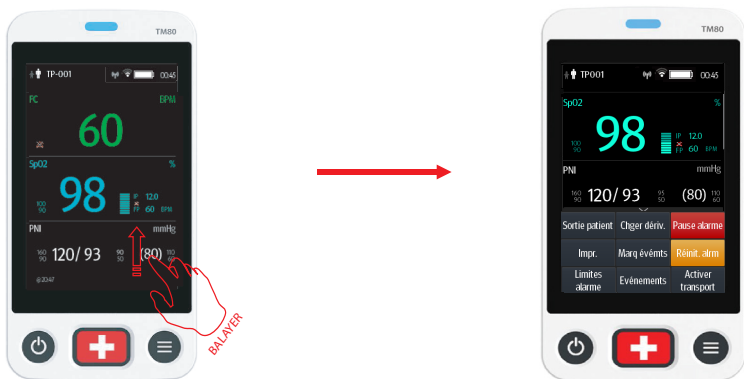

Remarque : Les raccourcis sont configurables. Les images ci-dessous ne sont que des exemples.

ECG

Contrôle de la stimulation


1. Appuyez sur la zone numérique FC ou sur la zone de tracé ECG pour accéder au menu **ECG**.
2. Réglez l'option **Stimulé** sur **Oui** ou **Non**.

Changement de dérivation

Si **Chger dériv.** est configuré dans la zone des raccourcis, le fait d'appuyer sur **Chger dériv.** permet de passer du premier tracé ECG actuel au tracé ECG suivant disponible dans l'ordre séquentiel.

RESP (en option)

Activation/désactivation de la fonctionnalité Resp


1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages des paramètres**.
3. Activez ou désactivez **Resp**.

Réglage du délai d'apnée


1. Appuyez sur la zone numérique Resp ou la zone de tracé Resp pour accéder au menu **Resp**.
2. Réglez le **Délai d'apnée**.

Surveillance avec un BP10

Couplage d'un TM80 et d'un BP10

1. Appuyez sur la touche MPAN dans le volet droit du BP10.
2. Appuyez sur  pour accéder au menu principal du TM80.
3. Appuyez sur **Modules sans fil** → appuyez sur **MPAN** → sélectionnez **Connecter au BP10** → sélectionnez le dispositif souhaité dans la liste des dispositifs → appuyez sur **Connexion**.

Découplage à partir du TM80

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal du TM80.
2. Appuyez sur **Modules sans fil** → dans la liste des dispositifs, sélectionnez le dispositif que vous souhaitez déconnecter → appuyez sur **Déconnexion** ou
3. Appuyez sur **Modules sans fil** → appuyez sur **MPAN** → sélectionnez **Arr.**

Découplage via le BP10


1. Appuyez sur la touche MPAN dans le volet droit du BP10.
2. Sélectionnez **Oui** lorsque le message d'invite "Etes-vous sûr de vouloir fermer MPAN et de découpler le BP10 ?" apparaît.

ATTENTION :

Avant d'apparier un BP10 à un nouveau TM80, découpez-le d'abord du TM80 actuel.
Avant de déplacer un TM80 ou un BP10 dans une autre zone, découpez-les d'abord.
Avant d'admettre un nouveau patient sur un BP10, vous devez d'abord le découpler d'un TM80.



Sortie d'un patient


Sélectionnez le raccourci **Sortie patient**. ou

Appuyez sur  pour accéder au menu principal → appuyez sur **Sortie patient**.


Alarmes

Symboles de l'état d'alarme


Symbole	Description
	Toutes les alarmes sont en pause.
	Les alarmes sonores sont désactivées.

Symbole	Description
	Les alarmes sont acquittées et le système d'alarme est réinitialisé.

Modification des propriétés des alarmes de paramètre


1. Accédez au menu **Limites alarme** de l'une des manières suivantes :
 - ◆ Sélectionnez le raccourci **Limites alarme**.
 - ◆ Appuyez sur  pour accéder au menu principal → appuyez sur **Alarmes** → appuyez sur **Limites alarme**.
2. Appuyez sur un paramètre et définissez ses propriétés d'alarme.

Modification des réglages d'alarme d'arythmie

1. Accédez au menu **Régl. Alarme de l'arythmie** de l'une des manières suivantes :
 - ◆ Appuyez sur le raccourci **Régl. Alarme de l'arythmie** s'il est configuré dans la zone des raccourcis.
 - ◆ Appuyez sur  pour accéder au menu principal → appuyez sur **Alarmes** → appuyez sur **Régl. Alarme de l'arythmie**.
2. Appuyez sur un paramètre et définissez ses propriétés d'alarme.

Pause des alarmes

Appuyez sur le raccourci **Pause alarme**. ou



Appuyez sur  pour accéder au menu principal → à partir de la **section Commandes**, appuyez sur **Pause alarme**.

Réinitialisation des alarmes


Appuyez sur le raccourci **Réinit. alm.** ou

Appuyez sur  pour accéder au menu principal → à partir de la **section Commandes**, appuyez sur **Réinit. alm.**

Déverrouillage de l'écran

1. Si l'affichage est éteint, appuyez sur  ou  pour l'activer et accéder au menu **Ecran verr.**
2. Saisissez le mot de passe pour déverrouiller l'écran.


Réglage des volumes sonores

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **Volume audio**.
3. Sélectionnez la catégorie à ajuster et faites glisser le curseur au volume approprié.

Revue


Consultation des événements

Appuyez sur le raccourci **Événements**. ou

Appuyez sur  pour accéder au menu principal → appuyez sur **Revoir** → appuyez sur **Événements**.


Consultation des tendances tabulaires

Sur la page de revue des événements, sélectionnez l'onglet **Tendances tabulaires**. ou


Appuyez sur  pour accéder au menu principal → appuyez sur **Revoir** → appuyez sur **Tendances tabulaires**.

Activation/désactivation du mode Veille

Activation du mode Veille

1. Accédez à la boîte de dialogue Veille de l'une des manières suivantes :
 - ◆ Appuyez sur le raccourci **Veille** s'il est configuré dans la zone des raccourcis.
 - ◆ Appuyez sur  pour accéder au menu principal → appuyez sur **Veille**.
2. Appuyez sur **Oui**.

Désactivation du mode Veille

Appuyez sur  pour quitter le mode Veille.

Activation/désactivation du transport

Activation du transport

Appuyez sur le raccourci **Activer transport**. Ensuite, l'affichage du TM80 est toujours activé et les alarmes sont émises localement.

Désactivation du transport

Appuyez sur le raccourci **Désactiver transport**.



046-008357-00(3.0)

mindray